


Totaalconcept voor high-level desinfectie van invasieve medische hulpmiddelen zonder werkkanaal.

Toepassingen:

- TEE-sondes
- nasofaryngoscopen
- vaginale en rectale sondes
- video-laryngoscopen
- manometrie katheters
- oftalmologische instrumenten

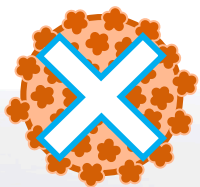

**TRISTEL TRIO
WIPES SYSTEM
VERNIETIGT HPV
OP ECHTE MEDISCHE
HULPMIDDELEN***

*Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) 'The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes' DOI: 10.1002/jmv.25666.

HET TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM IS EENVOUDIG TE GEBRUIKEN



Het Reinigingsdoekje
(Tristel Pre-Clean Wipe)

wordt gebruikt om vuil en organisch materiaal van het medisch hulpmiddel te verwijderen. Het Reinigingsdoekje is geïmpregneerd met een drievoudig enzymatisch detergent en een oppervlakte-actieve stof.



Het Sporicide doekje en Activatorschuim

(Tristel Sporicidal Wipe & Activator Foam)

worden gecombineerd om chloordioxide te genereren, een zeer effectief biocide dat in 30 seconden actief is tegen bacteriën, schimmels, virussen, mycobacteriën en sporen.



Het Spoeldoekje
(Tristel Rinse Wipe)

is geïmpregneerd met gedemineraliseerd water en heeft een laag antioxidantengehalte, en wordt gebruikt om chemische resten van het oppervlak te verwijderen.



Het Audit & Quality Register of de Tristel Traceability App

zijn bedoeld voor de eenvoudige registratie van alle stappen van het proces, inclusief verificatie en validering door de verantwoordelijke persoon.

Tristel TrioTM
Wipes System



Tristel Pre-Clean Wipe
Medisch Hulpmiddel Klasse I



Tristel Sporicidal Wipe
Medisch Hulpmiddel Klasse IIb



Tristel Activator Foam
Medisch Hulpmiddel Klasse IIb



Tristel Rinse Wipe
Steriel Hulpmiddel Klasse I





WERKZAAM

Wereldwijd gevalideerd volgens de meest recente Europese normen. Effectief tegen sporen, mycobacteriën, Gram- en Gram+ bacteriën, schimmels, omhulde en niet-omhulde virussen.



ECONOMISCH

Geen investering vereist in machines en onderhoudscontracten.



FLEXIBEL

Kan zowel voor stationaire als mobiele ontsmetting gebruikt worden.



SNEL

Ontsmettingsproces (reiniging, high-level desinfectie en spoeling) uitgevoerd in slechts 2 minuten.



COMPATIBEL

Het Tristel Trio Wipes System is door toonaangevende fabrikanten van medische instrumenten gevalideerd als compatibel met hun materiaal:

- Advanced Tactile Imaging, Inc.
- Airtraq*
- Arthrex
- Atmos
- Bard
- Becton Dickinson
- BK Ultrasound
- Canon (Toshiba)
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Clarus Medical
- Echosens
- Esaote*
- Exact Imaging
- Fisher & Paykel
- GE Healthcare
- Haag-Streit
- Hitachi
- Karl Storz
- Laborie (Cogentix Medical, MMS)
- Machida Endoscope Co.
- MCube
- Medcom
- Medtronic
- Mindray
- Neoplas Tools
- Ocular Instruments Inc
- Optim LLC
- Orvision
- Philips
- Samsung Healthcare
- SapiMed
- Siemens Healthineers
- SonoScape*
- FUJIFILM SonoSite
- Unisensor
- Verathon


* Compatibel met het Tristel Sporicide doekje dat deel uitmaakt van het Tristel Trio Wipes System



GEDOCUMENTEERD

Registratie en eenvoudige validatie van alle ontsmettingsprocessen met het Audit & Quality Register of de Tristel Traceability App.

Microbiologische testrapporten

	Europese normen (EN)	Uniforme contacttijd
Bacteriën	EN 13727	
	EN 14561 (fase 2 - stap 2)	
	EN 16615 (fase 2 - stap 2)	
Gisten/schimmels	EN 13624	
	EN 14562 (fase 2 - stap 2)	
	EN 16615 (fase 2 - stap 2)	
Virussen	EN 14476	
Mycobacteriën	EN 14348	
	EN 14563 (fase 2 - stap 2)	
Sporen	EN 17126*	

De normen (voor medische hulpmiddelen) opgenomen in deze tabel zijn de enige die van tel zijn voor de vermelde micro-organismen. *Treedt in werking in juni 2020.



Het Tristel Trio Wipes System biedt een complete desinfectie van flexibele invasieve medische hulpmiddelen zonder werkkanaal. Dankzij het concept van reiniging, high-level desinfectie en spoeling wordt een gevalideerd resultaat bereikt met een eenvoudig en snel drie-stappen proces.

TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM ⁵⁰

- 50 ontsmettingsprocedures, inclusief Audit & Quality Register.



Meer informatie over het Tristel Trio Wipes System, zoals veiligheidsinformatiebladen, rapporten, publicaties over materialen en studies, is beschikbaar op aanvraag of online via: www.tristel.com

TristelTM
WE HAVE CHEMISTRY.

geproduceerd door: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com
België: Tristel NV, Smalendlaan 14B, 2660 Antwerpen, België
T +32 (0)3 889 26 40 - E belgium@tristel.com
Nederland: Tristel B.V., Binderij 7 R, 1185 ZH Amstelveen, Nederland
T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com

Voor informatie over de octrooien: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Bro-720-3
February 2020

blz. 2 van 2